


## 電源 ON と機器の設定

電源を入れてメニューを表示させ、各種設定を行います。

1. **電源** ボタンを押すと、起動中の画面が表示されます。
2. しばらくすると給水を促す初期画面が表示されます。
3. **メニュー** ボタンを押すと、メニュー画面 1 が表示されます。  
※ **上下セレクト** ボタンを下方方向に押しつづけると、「メニュー画面 2」、「メニュー画面 3」、「メニュー画面 4」へと表示が変わります。

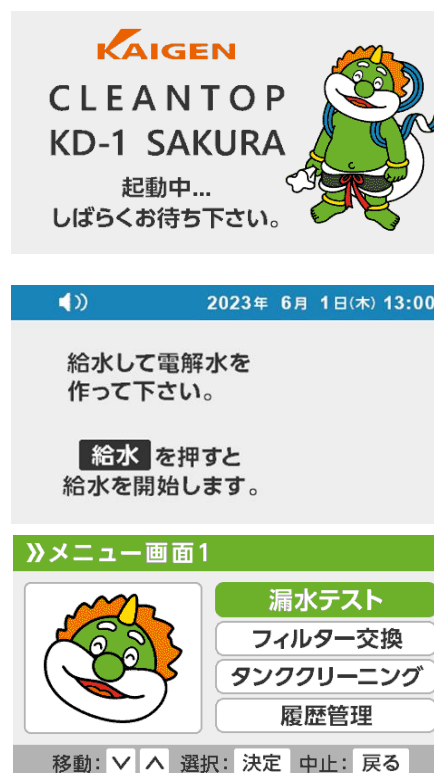

## 各モード登録設定

各モードで洗浄消毒時に漏水テスト・洗剤による洗浄・アルコールフラッシュを行うかどうかの設定を登録します。

1. **上下セレクト** ボタンを押し、メニュー画面 2 まで移動します。
2. **上下セレクト** ボタンで変更を行いたい **モード登録設定** を選び、**決定** ボタンを押します。
3. **上下セレクト** ボタンで変更を行いたい設定を選び、**決定** ボタンを押します。
4. それぞれの設定が終われば **戻る** ボタンを押します。



## 漏水テスト設定（モード登録設定）

各モードで洗浄消毒前に漏水テストを行うかどうかを設定します。

1. **上下セレクト**ボタンを押し、メニュー画面 2 まで移動し、変更を行いたい**モード登録設定**を選び、**決定**ボタンを押します。
2. **上下セレクト**ボタンで**漏水テスト設定**を選び、**決定**ボタンを押します。
3. **上下セレクト**ボタンで「有」/「無」を設定します。  
※ 初期設定は「無」です。
4. 設定が終われば、**戻る**ボタンを押します。



## 洗剤設定（モード登録設定）

各モードで消毒前に洗剤による洗浄を行うかどうかを設定します。

1. **上下セレクト**ボタンを押し、メニュー画面 2 まで移動し、変更を行いたい**モード登録設定**を選び、**決定**ボタンを押します。
2. **上下セレクト**ボタンで**洗剤設定**を選び、**決定**ボタンを押します。
3. **上下セレクト**ボタンで有/無を設定します。  
※ 初期設定は「有」です。
4. 設定が終われば、**戻る**ボタンを押します。



## アルコール設定 (モード登録設定)

各モードで消毒後にアルコールフラッシュを行うかどうかを設定します。

1. **上下セレクト** ボタンを押し、メニュー画面 2 まで移動し、設定を行いたい **モード登録設定** を選び、**決定** ボタンを押します。
2. **上下セレクト** ボタンで **アルコール設定** を選び、**決定** ボタンを押します。
3. **上下セレクト** ボタンで動作時間を設定します(最長 99 分)。  
※ 初期設定は 5 分です。
4. **決定** ボタンで有/無 を設定します。  
※ 初期設定は「無」です。
5. 設定が終われば、**戻る** ボタンを押します。



## アルコール設定 (単独動作)

単独で行うアルコールフラッシュの動作時間を設定します。

**上下セレクト** ボタンを押し、メニュー画面 3 まで移動します。

1. **上下セレクト** ボタンで **アルコール設定** を選び、**決定** ボタンを押します。
2. **上下セレクト** ボタンで動作時間を設定します(最長 99 分)。  
※ 初期設定は 5 分です。
3. 設定が終われば、**戻る** ボタンを押します。



## 送気設定（単独動作）

単独で行う送気の動作時間を設定します。

1. **上下セレクト** ボタンを押し、メニュー画面 3 まで移動します。
2. **上下セレクト** ボタンで**送気設定**を選び、**決定** ボタンを押します。
3. **上下セレクト** ボタンで動作時間を設定します(最長 99 分)。  
※ 初期設定は 3 分です。
4. 設定が終われば、**戻る** ボタンを押します。



## その他設定

### 時刻調整

時刻を調整することができます。

1. **上下セレクト** ボタンを押し、メニュー画面 3 まで移動します。
2. **上下セレクト** ボタンで**その他の設定**を選び、**決定** ボタンを押します。
3. **上下セレクト** ボタンで**時刻調整**を選び、**決定** ボタンを押します。
4. **上下セレクト** ボタンで年月日と時刻を調整します。
5. 次の項目を調整する場合は、**決定** ボタンを押します。
6. 設定が終われば、**戻る** ボタンを押します。



## 画面明るさ調整

本体表示画面の明るさを調節することができます。

1. **上下セレクト**ボタンを押し、メニュー画面 3 まで移動します。
2. **上下セレクト**ボタンで**その他の設定**を選び、**決定**ボタンを押しします。
3. **上下セレクト**ボタンで**画面明るさ調整**を選び、**決定**ボタンを押しします。
4. **上下セレクト**ボタンで設定値を変更します。  
※ 初期設定は「10」です。
5. 設定が終われば、**戻る**ボタンを押しします。



## ブザー設定

消毒終了時、各種ボタン操作時、エラー時に出る音(ブザー)の大きさを設定します。  
ブザー音量は「大」「小」「無」の3段階から選択できます。

1. **上下セレクト**ボタンを押し、メニュー画面 3 まで移動します。
2. **上下セレクト**ボタンで**その他の設定**を選び、**決定**ボタンを押しします。
3. **上下セレクト**ボタンで**ブザー設定**を選び、**決定**ボタンを押しします。
4. **上下セレクト**ボタンで大/小/無 を設定します。  
※ 初期設定は「大」です。
5. 設定が終われば、**戻る**ボタンを押しします。  
※ ブザー設定が「無」の場合でも、エラー発生時はブザーが鳴ります。



## 自己洗浄

消毒槽、機器内部の電解槽及び送液経路を水道水で洗浄します。

※電気分解後は自己洗浄を受けつけません。排水してから再度行ってください。

1. **上下セレクト**ボタンを押し、メニュー画面 4 まで移動します。
2. **上下セレクト**ボタンで**自己洗浄**を選び、**決定**ボタンを押します。
3. **スタート/ストップ**ボタンを押します。
4. 自己洗浄が始まります。

約 10 分で自己洗浄が終了し、右図(待機画面)に変わります。

※ ご使用環境の水圧によって所要時間は変動します。

## 履歴管理設定

履歴管理機能の有無、機器番号の設定を行います。

履歴管理データの保存件数が確認できます。




1. **上下セレクト**ボタンを押し、メニュー画面 4 まで移動します。
2. **上下セレクト**ボタンで**履歴管理設定**を選び、**決定**ボタンを押します。

**上下セレクト**ボタンで機器番号を変えることができます。

※ 複数台で履歴管理をするときは、機器識別のために設定を行なってください。(00~35 の範囲で設定可)

**決定**ボタンで履歴管理の有/無を設定します。

※ 初期設定は「無」です。

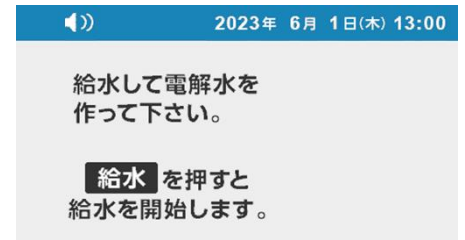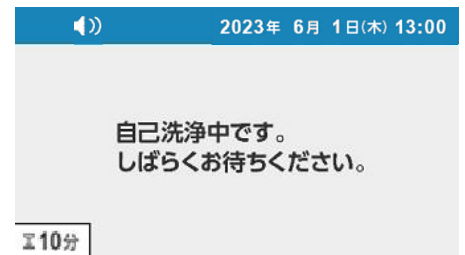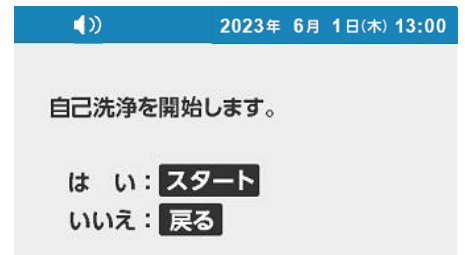

3. 設定が終われば、**戻る**ボタンを押します。

※ 履歴管理データの保存件数は最大 600 件です。

※ 600 件を超えると最も古い履歴管理データから削除されます。

※ 履歴管理データが必要な場合には、速やかに付属の USB メモリに保存してください。

## 排水時間設定

各工程(洗剤、リンス 1、リンス 2)における消毒槽の排水時間を設定します。

1. **上下セレクト**ボタンを押し、メニュー画面 4 まで移動します。

2. **上下セレクト**ボタンで**排水時間設定**を選び、**決定**ボタンを押します。

3. **上下セレクト**ボタンで動作時間を設定します。(最長 60 秒)

※ 初期設定は 35 秒です。

4. 設定が終われば、**戻る**ボタンを押します。



## リンス 2 ブロー設定

洗浄消毒終了時(リンス 2 工程の最後)の送気時間を設定します。

1. **上下セレクト**ボタンを押し、メニュー画面 4 まで移動します。

2. **上下セレクト**ボタンで**リンス 2 ブロー設定**を選び、**決定**ボタンを押します。

3. **上下セレクト**ボタンで動作時間を設定します。(最長 4 分)

※ 初期設定は 1 分です。

4. 設定が終われば、**戻る**ボタンを押します。






## 表示アイコンの説明

- ※ ブザー設定を「大」又は「小」にすると、待機画面の左上にアイコンが表示されます。
- ※ モード選択のアイコンは電気分解後に表示されます。
- ※ 各モードにて洗剤設定、アルコール設定、漏水テストを「有」にすると、電気分解後の待機画面でアイコンが表示されます。
- ※ メッセージアイコンは、機器の状態によって必要なときに自動的に表示されます
- ※ モード選択は電気分解酸性水を作った後にのみ表示されます。



待機画面

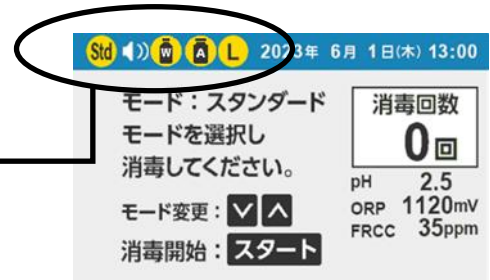

待機画面(電気分解後)

