


洗浄・消毒


1. 洗剤洗浄の設定を「有」にした場合は、洗剤が洗剤ボトルに入っていることを、フロントカバーの洗剤残量確認窓で確認してください。

アルコール設定を「有」にした場合は、消毒工程の最後でアルコールフラッシュを行います。アルコールがアルコールタンクに入っていることを、フロントカバーのアルコール残量確認窓で確認してください。

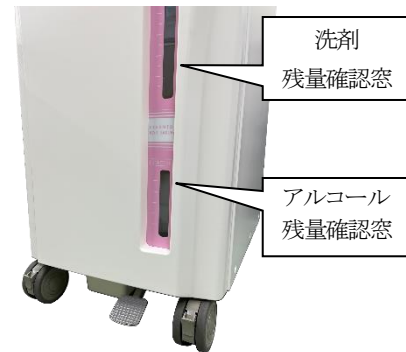

2. **上下セレクト**ボタンでモードを選択し、**スタート/ストップ**ボタンを押します。

- ※ 選択したモードで漏水テスト設定を「有」にした場合は、漏水テストを行います。
- ※ 各モードを選択した後にメニューを押す、またはトップカバーを開けるなどの画面が切り替わる操作を行うと、モードはスタンダードへ戻ります。

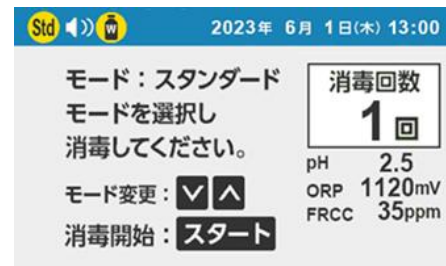

3. 洗剤洗浄を開始します。

- ※ 選択したモードで洗剤洗浄の設定を「無」に設定した場合は、右図のメッセージは表示されず、4. に移行します。
- ※ 設定を変更するには、27 ページ「洗剤設定」をご覧ください。



4. 洗浄終了後、水道水によるすすぎ(リンス1)を行います。



5. 水道水によるすすぎ後、電解酸性水による消毒を開始します。

