

お得意先様各位

カイゲンファーマ株式会社

大阪市中央区道修町二丁目5番14号

軟性内視鏡用洗浄消毒器

クリーントップ KD-1

アルコールフラッシュに使用可能なアルコール種類についてのお知らせ

謹啓

時下益々ご清栄の段お慶び申し上げます。平素は格別のご高配賜り厚く御礼申し上げます。

さて 弊社の軟性内視鏡用洗浄消毒器クリーントップ KD-1の添付文書には「アルコールフラッシュには消毒用エタノールを使用すること」と記載されておりますが、日局消毒用エタノール以外の使用可否についてのお問い合わせを多数頂戴しております。今般、市販されている消毒用エタノールについての情報をまとめましたので、ご案内申し上げます。

謹白

記

クリーントップ KD-1のアルコールフラッシュには、日局 消毒用エタノール、もしくは添加剤としてイソプロパノール5%未満又は日局 ユーカリ油を微量含む消毒用エタノールの使用を推奨いたします。

使用可否	名称	エタノール含量	添加剤
◎特に推奨	日局 消毒用エタノール	76.9～81.4vol%	—
○使用可	消毒用エタノール (イソプロ5%未満含有)		イソプロパノール3.7vol%
○使用可	消毒用エタノール (ユーカリ油含有)		日局 ユーカリ油 (微量)
×使用不可	消毒用エタノール (着色剤含有)		着色剤のみ又はその他を含む
×使用不可	消毒用エタノール (グリセリン含有)		グリセリン0.9w/v%と イソプロパノール4.9 vol%など

参考：日本消化器内視鏡技師会発行 WGO-OMGE/OMED 内視鏡洗浄消毒に関する実践ガイドライン訳文

- ※ イソプロパノールの含量の高いものは、蒸気毒性の観点から推奨致しません。
- ※ 着色剤を含むものは、長期使用による変色等の影響が不明であるため推奨致しません。
- ※ グリセリンなど湿潤剤を含むものは、乾燥不良の原因となる可能性があるため推奨致しません。

なお、裏面に消毒用エタノール以外の消毒剤に関する情報を記載しておりますのでご参照ください。

【本件に関するお問い合わせ先】カイゲンファーマ株式会社 お客様相談室

☎電話：06-6202-8975 ☎☎受付時間：9：00～17：00（土曜、日曜、祝日、夏期休暇、年末年始を除く）

【留意事項】

次表の外皮用殺菌消毒剤に分類される医療用医薬品には「消毒用●●」「■■アルコール」といった製品名で販売されているものがございますが、これらはいわゆる消毒用エタノール（有効成分としてエタノール76.9～81.4vol%を含有）ではありません。

名称	エタノール	イソプロパノール	その他の成分
日局 エタノール または エタノール(95)	95.1～96.9vol%	—	—
日局 無水エタノール または エタノール(99.5)	99.5vol%以上	—	—
イソプロパノール	—	50%,70%,99%など	—
イソプロパノール・メタノール変性アルコール	メタノール変性アルコール40%～60%	18～23%	着色剤
イソプロパノール・エタノール	60%	18%	着色剤
クロルヘキシジングルコン酸塩・アルコール	83vol% ※エタノールは添加剤	—	クロルヘキシジングルコン酸塩ほか
チオ硫酸ナトリウム水和剤・エタノール	65vol% ※エタノールは添加剤	—	チオ硫酸ナトリウムほか

以上